

Anleitung Infektionsdiagnostik (Viren, Bakterien & Pilze)

Das Probenmaterial:

Federproben:	immer frisch gezupfte Federn verwenden (mindestens 2-3 Stück)
Blutproben:	0,5 ml Blut in EDTA-Röhrchen oder 2 Blutfedern oder 2-3 Tropfen Blut auf einem sterilen Wattestäbchen (Q-Tip) oder sterilen Tupfer
Abstriche:	auf sterilem Wattestäbchen oder sterilem Tupfer

Welches Probenmaterial wird für welche DNA-Analyse benötigt?

aviäre Polyomaviren (APV)	Federn oder Blut
psittacine Circoviren (PBFV)	Federn + Blut
psittacine Chlamydien	Blut oder Kloakenabstrich
psittacine Herpesviren (Pacheco)	Federn oder Blut
aviäre Bornaviren (PDD)	Federn + Blut oder Gewebe + Kloakentupfer
Aspergillose	Luftröhrenabstrich

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Achten Sie während der Probenahme auf eine ausreichende Hygiene, wie z.B. saubere Hände, Verwendung von frischen Tüten und Briefumschlägen.
- Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, sollten alle Proben mit Einweghandschuhen gewonnen werden. Bitte wechseln Sie die Handschuhe dabei für jeden Vogel.
- Für einige Nachweise von Krankheitserregern ist das Einschicken einer Blutprobe oder eines Kloakenabstrichs/Luftröhrenabstrichs notwendig. Diese Proben können Sie bei entsprechender Sachkunde selbst nehmen, sollten aber bei Unsicherheiten hierfür einen Tierarzt aufsuchen.



post Tauros-Diagnostik GbR | Niederwall 5 | D-33602 Bielefeld

fon +49(o)521.32930030 | fax +49(o)521.32930033

www.tauros-diagnostik-shop.de | email shop@tauros-diagnostik.de

