

Aanleiding infectiediagnostiek (virussen, bacteriën en schimmels)

Het proefmateriaal

- Veerproeven: Altijd vers uitgetrokken veren gebruiken (minstens 2- 3 stuks).
- Bloedproeven: 0,5 ml bloed in een EDTA buisje of twee veren met bloed of 2 – 3 druppels bloed op een steriel wattenstaafje of steriel gaasje.
- Uitstrijkjes: Op een steriel wattenstaafje of een steriel gaasje.

Welk proefmateriaal is voor welke DNA-analyse nodig?

- | | |
|---|--|
| Avian Polyomavirussen (APV): | veren of bloed |
| Psittacine Circovirussen (PBFD): | veren + bloed |
| Psittacine Chlamydochila (Papegaaizenziekte): | bloed of een uitstrijkje van de cloaca |
| Psittacine Herpesvirussen (Pacheco): | veren of bloed |
| Aviaire bornavirussen (PDD): | 3-4 pas geplukte veren, minst 3-4cm |
| Aspergillose: | uitstrijkje van de keel |

Let u alstublieft op de volgende aanwijzingen:

Zorg voor voldoende hygiëne bij het nemen van de proeven, zoals schone handen, het gebruik van nieuwe zakjes en enveloppen.

Om kruisbesmetting te vermijden, is het bij het nemen van de proeven aan te raden gebruik te maken van wegwerphandschoenen. Wisselt u daarbij alstublieft per vogel van handschoenen.

Voor het kunnen aantonen van enkele ziekteverwekkers is het insturen van een bloedproef of een uitstrijkje van cloaca of keel noodzakelijk. Wanneer u voldoende deskundig bent, kunt u dergelijke proeven zelf nemen, maar indien u hierin onzeker bent, zult u een dierenarts moeten raadplegen.



post Tauros-Diagnostik GbR | Niederwall 5 | D-33602 Bielefeld

fon +49(o)521.32930030 | fax +49(o)521.32930033

www.tauros-diagnostik-shop.de | email shop@tauros-diagnostik.de

