

Wichtige Mitteilung zum Probenmaterial

Die Sensitivität der angewandten Analysen hängt maßgeblich vom Zustand und von der Art des eingesandten Probenmaterials ab.

Circoviren sind z.B. im Blut aber nicht zu jedem Zeitpunkt in Federproben auffindbar. Bornaviren lassen sich wiederum wesentlich besser und über einen längeren Zeitraum in Federn als in Blutproben nachweisen.

Bitte senden Sie uns immer das von uns angegebene Probenmaterial, damit wir eine größtmögliche Zuverlässigkeit der Untersuchungen gewährleisten können.

Welches Probenmaterial wird für welche Analyse benötigt?

psittacine Polyomaviren (APV)	Blut oder frisch gezupfte Federn (3-4 Stück, mind. 4 cm lang)
psittacine Circoviren (PBFD)	Blut und frisch gezupften Federn (3-4 Stück, mind. 4 cm lang)
psittacine Herpesviren (Pacheco)	Blut oder frisch gezupfte Federn (3-4 St. mind. 4 cm lang)
aviäre Bornaviren (PDD)	frisch gezupfte Federn (5-6 Stück, mind. 4 cm lang)
psittacine Chlamydien (Chlamydiose)	Blut oder Kloakenabstrich
Aspergillose	Luftröhrenabstrich